

Будь ласка, уважно прочитайте інформацію з використання!

Краплі очні зволожуючі ОФТОЛІК БАЛАНС, стерильні Інструкція із застосування

Форма випуску медичного виробу. Краплі очні без консервантів, розчин

Загальні відомості.

Склад:

натрію гіалуронат 0,2% (м / о), TS-полісахарид 0,2% (м / о), манітол, цитрат натрію, лимонна кислота, вода для ін'єкцій.

Характеристика:

Офтолїк-Баланс - стерильні очні краплі, без консервантів, що містять гіалуронат натрію та TS-полісахарид. Розчин підходить для використання з усіма видами контактних лінз.

Натрію гіалуронат - речовина, яка завдяки своїм зволожуючим властивостям і в'язкості розчину, сприяє зволожуючому ефекту та нормалізації стану очної плівки.

TS-полісахарид - це натуральна речовина, отримана з насіння рослини Тамаринд індійський, яка є ефективною в запобіганні рогівково-кон'юнктивального ксерозу.

TS-полісахарид створює захисну плівку на поверхні ока, яка сприяє відновленню фізіологічного балансу очної плівки та поверхні ока.

Комбінація цих двох речовин в складі одного препарату забезпечує синергічну дію на поверхні епітелію рогівки та кон'юнктиви, що перешкоджає подразненню, викликаному дією факторів навколишнього середовища (вітер, сонце, дим, сухе повітря), дією стресу (приміщення із зайвим освітленням або тривале використання комп'ютера) або механічних факторів (носіння контактних лінз, стан після проведення офтальмологічної операції).


Розчин не містить консервантів і сумісний з усіма видами контактних лінз.

Застосування:

Офтолїк Баланс - стерильний офтальмологічний зволожуючий розчин, без консервантів, що містить захисні речовини: високомолекулярний натрію гіалуронат, який отримують шляхом біотехнологічного процесу, та TS-полісахарид з мукоадгезивною дією, що зволожують та нормалізують стан слизової оболонки ока.

Показання до застосування: Застосовується для зменшення відчуття сухості очей.

Спосіб застосування: по 1 краплі в кон'юнктивальний мішок ураженого ока один або декілька разів на день, в залежності від ступеня прояву симптомів.

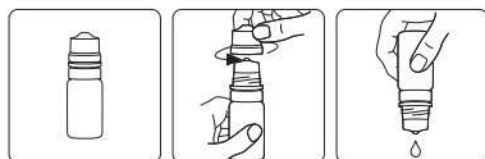

Особливі вказівки та запобіжні заходи:

- препарат призначений тільки для зовнішнього застосування;
- не використовуйте розчин, якщо флакон пошкоджений;

- не використовувати при чутливості до певних компонентів медичного виробу;
- не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі;
- не можна торкатися носиком флакона до слизових оболонок ока;
- при застосуванні очних крапель можлива тимчасова нечіткість зору через велику в'язкість розчину;
- рекомендується почекати 10-15 хвилин перед застосуванням іншого препарату для лікування захворювань ока;
- термін придатності після відкриття флакону - до 90 днів;
- зберігати в недоступному для дітей місці;
- зберігати при температурі нижче 25 ° C;
- очні краплі не можна застосовувати всередину;
- щоб уникнути перетискання флакону не рекомендується закрапувати більше 30 крапель поспіль;
- після кожного застосування ретельно закривайте кришку флакона, переконайтесь, що на поверхні носика флакона не має крапель; при їх наявності - струсіть флакон різким рухом руки.

Упаковка: по 10 мл у багатодозовому флаконі разом з інструкцією поміщається всередину картонної коробки

Термін придатності:

2 роки.

Термін придатності препарату після першого відкриття оригінальної упаковки – до 90 діб.

Зберігання:

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці. Препарат не можна використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Виробник: Фарміджеа С.п.А., Виа Дж. Б. Олива, 6/8, 56121, Піза, Італія.

Уповноважений представник виробника в Україні:

Представництво «Сентісс Фарма Прайвет Лімітед», 03040, Україна, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Васильківська, будинок 14, корпус Б, офіс 316
Тел. +38050 388 62 81, e-mail: dl-ukraine-office@sentisspharma.com



Відходи і ємності утилізувати належним чином.

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: червень 2019 року.



CE 0546

